

PROTECTOR FACIAL PET PARA 024.5 X 025.5CM NIÑOS 10 UNID DURBAN



Código: 05030332

Marca: DURBAN

Familia: Cuidado Personal

Grupo: Protector facial

Medidas producto envasado

Longitud: 3.5 cm

Ancho: 28 cm

Alto: 29 cm

Peso Neto: 250 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica [haga clic aquí.](#)

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



Producto fabricado en China.

PROTECTOR FACIAL PET 24.5 x25.5cm 10 unid

- Marca: Durbán

- Producto: Protector Facial

- Modelo: Infantil
- Material: PET
- Dimensión x unid: 24.5 x 25.5cm (Alto x Ancho), 200 micrones
- Peso x unid: 25 grs
- Color: Parte superior Diseños, Careta Transparente
- Formato: Plástico
- Cantidad: 10 unid.
- Fabricación: China

Características

- Careta protectora infantil de aislamiento.
- Tratamiento Anti - Niebla en ambos lados de la lente.
- Cuenta con diadema de espuma el cual alivia la presión.
- El plástico PET - Tereftalato de Polietileno , es una materia prima reconocida como un material seguro, no tóxico, fuerte y flexible que es 100% reciclable.
- El plástico PET es fácil de reciclar
- Diseños de Animales como: 1 Corderito, 1 Dinosaurio, 1 Elefante, 1 Emoticons (carita Feliz), 1 Sirenita, 1 Panda, 1 Niña Angel.

Uso

- * Úselo solo como protector facial para evitar salpicaduras de líquido en :
 - Transporte Público.
 - Mercado.
 - Centro Comerciales.
 - Guarderías.
 - Zonas de alta afluencia de personas

Recomendaciones de uso

- Retire suavemente la película protectora posterior y frontal antes de usar.
- Lavarse las manos con Jabón.
- Colocar mascarilla Durbán / (el protector facial no reemplaza el uso de la mascarilla.)
- Colocar Careta Facial Durbán
- Lavar manos nuevamente con jabón
- Al retirar el Protector facial , hazlo siempre del arco de la careta o en las ligas elásticas.
- Lavar manos nuevamente con jabón.

Conservación del Protector Facial

- Lavar el protector Facial con agua y jabón
- Rociar con alcohol sobre toda la superficie del Protector Facial, esperar 1 minuto y secar con un paño o toalla limpios.
- El Protector Facial debe almacenarse en un lugar seco, limpio y ventilado o en un gabinete de herramientas de seguridad.

Advertencias

- Tratar de mantenerse alejado de entornos y lugares sobre calentados.
- Solo se puede usar como máscara para evitar las salpicaduras de líquidos.
- No acercarse a fuentes de calor.
- No use el Protector Facial dañado.