


## PROTECTOR FACIAL PET CON MARCO DE LENTE PARA ADULTOS 10 UNID DURBAN

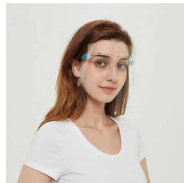

Código: 05030333

Marca: DURBAN

Familia: Cuidado Personal

Grupo: Protector facial

### Medidas producto envasado

|            |        |
|------------|--------|
| Longitud:  | 3 cm   |
| Ancho:     | 25 cm  |
| Alto:      | 20 cm  |
| Peso Neto: | 305 gr |

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica [haga clic aquí.](#)

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



Producto fabricado en China.

PROTECTOR FACIAL PET CON MARCO DE LENTE PARA ADULTOS 10 Unid DURBAN

- Marca: Durbán

- Producto: Protector Facial

- Modelo: Para Adultos / Con Marco de Lente
- Material: PET
- Diseño: Careta
- Dimensión x unid armada: 19.5 x 18.5cm (Alto x Ancho ), 200 micrones
- Peso x unid armada: 30 grs
- Color: Careta Transparente
- Formato: Plástico
- Cantidad: 10 unid.
- Fabricación: China

**Características**

- Careta protectora de aislamiento.
- Tratamiento Anti - Niebla en ambos lados de la lente.
- Cuenta con Marco de Lente adosado a la careta Facial.
- El plástico PET - Tereftalato de Polietileno , es una materia prima reconocida como un material seguro, no tóxico, fuerte y flexible que es 100% reciclable.
- El plástico PET es fácil de reciclar.

**Uso**

\* Úselo solo como protector facial para evitar salpicaduras de líquido en :

- Transporte Público.
- Mercado.
- Centro Comerciales.
- Guarderías.
- Zonas de alta afluencia de personas.

**Recomendaciones de uso**

- Retire suavemente la película protectora posterior y frontal antes de usar.
- Lavarse las manos con Jabón.
- Colocar mascarilla Durbán / (el protector facial no reemplaza el uso de la mascarilla)
- Colocar Careta Facial Durbán.
- Lavar manos nuevamente con jabón.
- Al retirar el Protector facial , hazlo siempre del arco de la careta o en las ligas elásticas.
- Lavar manos nuevamente con jabón.

**Conservación del Protector Facial**

- Lavar el protector Facial con agua y jabón.
- Rociar con alcohol sobre toda la superficie del Protector Facial, esperar 1 minuto y secar con un paño o toalla limpios.
- El Protector Facial debe almacenarse en un lugar seco, limpio y ventilado o en un gabinete de herramientas de seguridad.

## Advertencias

- Tratar de mantenerse alejado de entornos y lugares sobre calentados.
- Solo se puede usar como máscara para evitar las salpicaduras de líquidos.
- No acercarse a fuentes de calor.
- No use el Protector Facial dañado.